



## Schutzmaske – Re-usable

### Schritt 1

Entnehmen Sie die einzelnen Bauteile der Schutzmaske der Verpackung. Eine Verpackungseinheit enthält jeweils eine Silikonmaske, ein Silikonband, zwei KN95-Filter und ein Filtergehäuse aus Kunststoff (Vorder- und Rückseite).



### Schritt 2

Legen Sie einen KN95-Filter in die Vorderseite (Gehäuse ohne Ventilationsvorrichtung) des Filtergehäuses ein. Beachten Sie hier, dass die farbig blaue Seite des Filters nach außen zeigt. Anschließend rasten Sie die Rückseite des Gehäuses in die Vorderseite ein.



**Achtung:** Die beiden Gehäusehälften müssen anschließend bündig übereinanderliegen.



### Schritt 3

Stülpen Sie die Silikonmaske über die Widerhaken auf der Rückseite des Filtergehäuses mit der Ventilationseinheit

### Schritt 4

Fädeln Sie das Silikonband durch beide Ösen an der Filtergehäuseeinheit.  
Die Maske ist nun fertig für den Gebrauch.



### Bitte beachten Sie folgenden Zusatz:

Die Maske ist nach Anwendung gängiger Desinfektionsverfahren und einem Filtertausch wiederverwendbar.

Wir empfehlen, dass der Filter täglich gewechselt und die Maske täglich sachgemäß desinfiziert wird.

